



Reliance

Assure - Haftvermittler

REF AS



Der Assure®- Haftvermittler verbessert den Haftverbund bei allen normalen und atypischen Zahnschmelzzuständen z.B. Remineralisierungen, Fluoridlackbehandlungen und bei Milchzähnen. Darüber hinaus ist er zum Kleben auf Metalloberflächen (Amalgam, Gold, Nichtelegmetalle) geeignet. Er ersetzt dabei nicht nur den Primer des Klebers, sondern auch Metall - Haftvermittler. Assure® ist mit jedem Adhäsiv (chemisch- oder lichthärtend) anwendbar.

Assure® wird auf die geätzte und im Idealfall getrocknete* Zahnoberfläche (bzw. gereinigte Metalloberfläche) in zwei dünnen Schichten aufgetragen und kurz mit dem Luftstrahl getrocknet. Ein Lichthärten ist nicht notwendig. Auf die so vorbereitete Oberfläche kann dann wie gewohnt geklebt werden. Bei No-Mix-Klebern muss lediglich noch die Bracketbasis mit dem Primer bestrichen werden, die Adhäsivpaste kommt auf die Bracketbasis und das Bracket wird platziert.

* auch bei feuchten Oberflächen ist eine Anwendung von Assure® möglich. Die Haltbarkeit der Klebeverbindung hängt in diesem Falle von Toleranz gegenüber Feuchtigkeit der nachfolgenden Komponenten ab. Liegt der Schwerpunkt der Anwendung beim Kleben im feuchten Milieu, wird ein optimale Klebeverbindung erzielt, wenn auch ein hydrophiles Adhäsiv, wie z.B. das Assure® Adhäsiv Wet/ Dry verwendet wird.

HINWEIS: Die Adhäsive und Haftvermittler können sowohl bei Raumtemperatur, als auch im Kühlschrank (5-7 Grad Celsius) aufbewahrt werden. Eine kühle Lagerung verlängert die Haltbarkeit über die ausgewiesene Verbrauchsfrist hinaus.